

TRATTAMENTI
BREVI

STIMOLAZIONE
DEL
COLLAGENE

TEMPI
DI RECUPERO
RIDOTTI



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il trattamento può variare da 15 a 30 minuti in base alla zona da trattare e può essere effettuato in ogni momento della giornata.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è ben tollerabile.

Il paziente potrà avvertire una lieve sensazione di bruciore transitoria.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Presentando un leggero arrossamento che sparirà in 4/7 giorni, il paziente dovrà applicare compresse di ghiaccio e creme lenitive ed antibiotiche sulla zona trattata. Successivamente sarà di nuovo possibile usare cosmetici ed esporsi al sole, utilizzando una crema protettiva per almeno 30 giorni dalla fine del trattamento. La protezione solare è comunque fortemente consigliata senza limitazioni di durata.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

La pelle sarà levigata, tonica e compatta già dopo i primi giorni. Il paziente potrà assistere a un miglioramento continuo nei sei mesi successivi, grazie alla formazione di nuovo collagene, con risultati concreti e duraturi.

RISULTATI PRE-POST



Prima



Dopo

RUGHE SEVERE

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

CICATRICI ACNEICHE

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

SKIN RESURFACING TRADIZIONALE

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

SMAGLIATURE

Per gentile concessione della Dr.ssa M. N. Lisco, Alba Adriatica (TE)

RENAISSANCE®
The laser excellence

La pelle invecchia troppo in fretta. Spesso è colpa del tempo che passa, ma il motivo principale risiede in uno stile di vita sbagliato: alcool, fumo, errata alimentazione ed esposizione prolungata al sole sono le cause primarie di un invecchiamento precoce. Grazie alla tecnologia laser CO₂, e con un minimo investimento del tuo tempo, potrai intervenire sugli inestetismi della pelle, come rughe, cicatrici da acne o varicella, stimolando la rigenerazione dei tessuti e riscoprendo una pelle liscia e curata.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per tutti i tipi di pelle. Il medico potrà valutare il grado di abbronzatura per identificare al meglio tempi e caratteristiche delle sedute.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Il paziente deve evitare l'uso di lampade abbronzanti e l'esposizione solare per almeno un mese prima del trattamento. La pelle al momento della seduta deve essere ben deterata e priva di cosmetici ed il paziente deve evitare l'assunzione di farmaci che ne possano alterare la sensibilità alla luce. Il trattamento è normalmente ben tollerato, tuttavia, il medico potrà consigliare l'applicazione di una crema anestetica 40 minuti prima della seduta. Un accurato colloquio con il medico consentirà di valutare e programmare l'intervento.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Per un trattamento efficace occorrono mediamente da 1 a 3 sedute intervallate da almeno 45/60 giorni. Ogni paziente avrà un piano differenziato in base alla tipologia, sede e profondità dell'inestetismo oltre al tipo e colore della pelle.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **EL.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di EL.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability
Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekataliadepika.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8877442
Fax +39 055 9852894

Quanta System
L'ambizione di tutti ormai
Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale.
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica,
consultare il proprio medico.


ELEN®

Timbro del centro medico

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le
caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

Laser CO₂

Dedica un'ora
del tuo tempo
alla bellezza

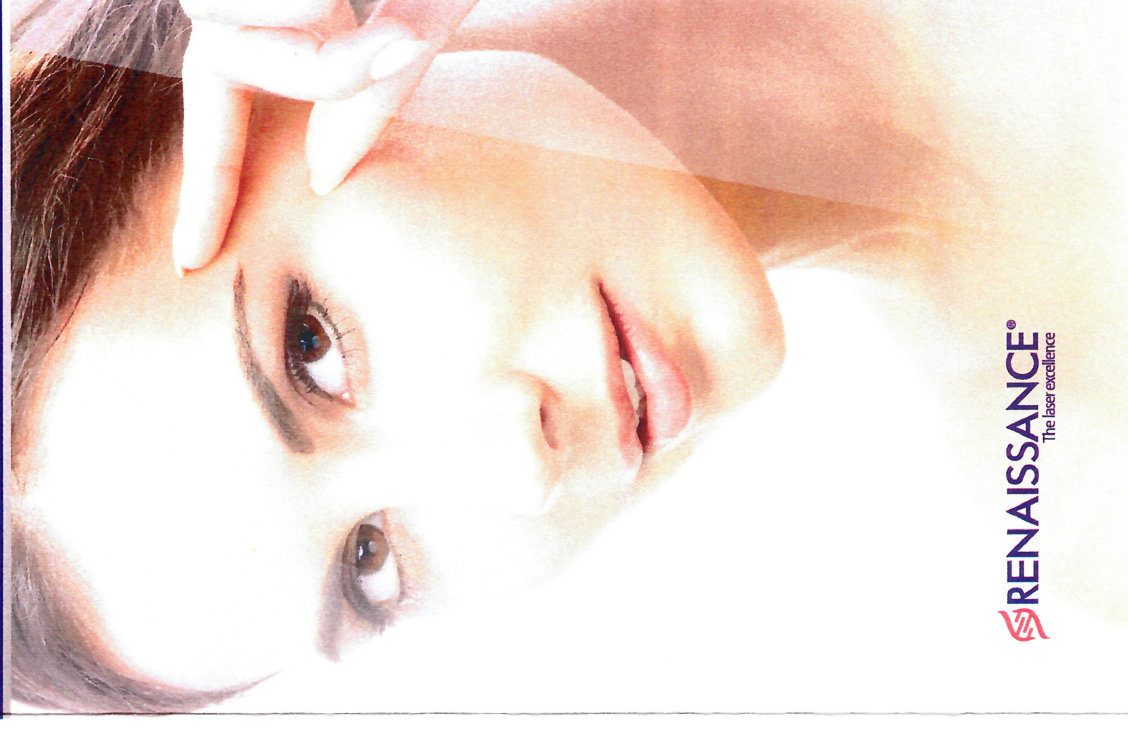

RENAISSANCE®
The laser excellence