

ADATTO
A NUMEROSI
TRATTAMENTI

PRECISIONE

SICUREZZA



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

La durata del trattamento dipende dalla dimensione e della gravità dell'inetestismo. In media le sedute variano dai 10 ai 20 minuti.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è ben tollerabile.
In caso di coinvolgimento di strati più profondi della cute o di aree particolarmente estese, potrà essere somministrata, a discrezione del medico, una piccola anestesia locale.

COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Dopo il trattamento può presentarsi un piccolo eritema e/o gonfiore destinato a scomparire in poco tempo. Per 7-10 giorni dalla fine del trattamento dovranno essere utilizzate per la medicazione creme antibiotiche, emollienti, evitando l'applicazione di alcun tipo di cosmetico fino alla completa guarigione. Successivamente potrà essere applicato anche il make-up. Viene fortemente consigliato l'utilizzo di creme idratanti e di protezione solare, senza limitazioni di durata.

QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

La tecnologia della sorgente laser CO₂ assicura risultati concreti. Il paziente potrà assistere ad un miglioramento continuo e costante durante le fasi trattamento, beneficiando di progressi estetici e funzionali.

RISULTATI PRE-POST



Prima



Dopo

CHERATOSI SEBORROICA

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

NEVO SEBACEO

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

DERMATOSI PAPULOSA NIGRA

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

NEUROFIBROMATOSI

Per gentile concessione della Dr.ssa F. Negosanti, Bologna

Con il laser CO₂ è possibile trattare in maniera efficace molti inestetismi e lesioni cutanee, salvaguardando il tessuto circostante, in totale sicurezza e con tempi di guarigione brevi.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento è indicato per la rimozione di cheratosi seborroiche ed attiniche, nevi epidermici, condilomi, adenomi sebacei, fibromi molli, siringomi, xantelasmi, verruche e neurofibromi, fino a trattamenti più importanti di rimodellamento cutaneo come rinofimi e cicatrici.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Si consiglia di effettuare il trattamento su pelli abbronzate. Per questo motivo, il paziente dovrà evitare l'uso di lampade abbronzanti e l'esposizione solare fino a un mese prima dell'inizio e per tutta la durata del ciclo di trattamenti. Un accurato colloquio con il medico consentirà di definire la situazione specifica (in particolare farmaci assunti e storia clinica) per una corretta valutazione del trattamento.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

La sorgente laser CO₂ può portare risultati immediati anche in una sola seduta. Il medico valuterà, il numero di trattamenti necessari, soprattutto in caso di lesioni complesse o che sono a rischio di recidive, quali le verruche.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **EL.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di EL.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekalaser@deka.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 9874942
Fax +39 055 9852864

Quanta System
Laser in cum tina
Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, consultare il proprio medico.

ELEN®

Timbro del centro medico

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

Una grande sorgente
laser al servizio della
piccola chirurgia
dermatologica

Laser CO₂



RENAISSANCE®
The laser excellence