



QUANTO DURA UNA SEDUTA?

Il trattamento con luce pulsata garantisce sedute molto veloci in base alla zona da trattare. Ogni seduta può variare da pochi minuti fino a un massimo di un'ora a seconda della complessità dei casi.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Il trattamento è indolore.
Il paziente avvertirà solo una leggera sensazione di calore e un lieve prurito nella zona trattata.


COSA DEVO FARE DOPO IL TRATTAMENTO?

Nelle 24-48 ore successive a una seduta è opportuno evitare docce con acqua troppo calda, profumi e deodoranti a base alcolica.
Per i successivi 15 giorni è vietata l'esposizione al sole e a lampade solari; successivamente sarà necessario utilizzare la protezione solare SPF 50+.


QUALI RISULTATI POSSO ASPETTARMI?

L'eccellenza dei trattamenti a luce pulsata assicura risultati sicuri e veloci nell'area trattata (macchie, capillari, bulbi piliferi o rughe).

RISULTATI PRE-POST

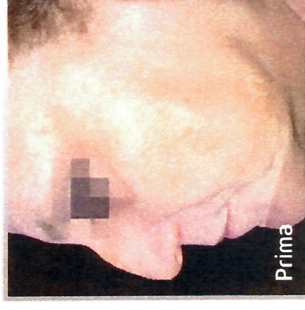

Prima

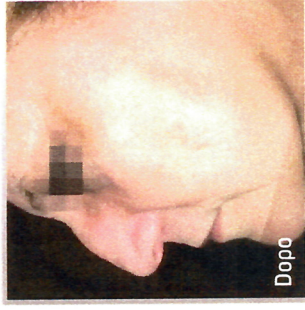

Dopo

Per gentile concessione del Dr. A. Platamone, Agrigento



Prima



Dopo

Per gentile concessione dei Prof. P. Campolmi - Prof. G. Cannarozzo - Prof. P. Bonan, Firenze



Prima



Dopo

Per gentile concessione del Prof. G. Cannarozzo - Università Tor Vergata, Roma

Grazie alla versatilità della luce pulsata è possibile effettuare diversi tipi di trattamento. L'interazione tra luce e pelle rimuove facilmente macchie superficiali (viso, mani, décolleté), lesioni vascolari superficiali (capillari sottili e rosacea) e peli indesiderati. La luce pulsata è uno degli strumenti più utili per il fotorinno e il fotorinno, stimolando la pelle e il rinnovamento senza alcuna azione invasiva, per il massimo comfort del paziente.

A CHI È RIVOLTO?

Il trattamento con luce pulsata è adatto per la maggior parte dei pazienti ed è ideale per chi ha la pelle chiara ed i peli più scuri.

L'epilazione non può essere fatta su cuoio capelluto, barba maschile e aree vicine agli occhi.

COSA DEVO FARE PRIMA DEL TRATTAMENTO?

Per una corretta riuscita del trattamento di epilazione, il paziente dovrà radere l'area interessata solo 2 giorni prima della seduta, senza applicare creme o altri cosmetici.

Al momento del trattamento la pelle deve essere integra e non abbronzata.

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

Per un trattamento efficace di epilazione occorrono in media dalle 3 alle 4 sedute ed è possibile arrivare fino a 10 nelle zone del corpo più estese.

Le macchie localizzate a diverse profondità dello strato cutaneo si eliminano invece in al massimo 1 o 2 sedute. Un accurato colloquio con il medico permetterà di valutare il programma di trattamenti più idoneo al caso specifico.

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **ELEN SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di ELEN, che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

DEKA
Innovative Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekalaser@dekaitalia.it
www.dekalaser.com
Tel. +39 055 8874242
Fax +39 055 9612864

Quanta System
Laser in your life
Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Seguici su



www.renaissancelaser.it

ELEN™

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale.
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica,
consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati.
Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificare le
caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

Una sola sorgente
per il comfort di
diversi trattamenti

Luce pulsata



RENAISSANCE®
The laser excellence